 <p><b>DIAGNÓSTICOS DE DROGAS</b> Programas de Dependência Química</p> <p>(11) 4522 0118 - Jundiaí - SP www.sapiensvita.com.br</p>	<p><b>SAPIENS VITA</b> Assessoria e Consultoria de Empresas Ltda.</p> <p>Rua Manoel Pereira de Arruda, 339 – Bela Vista Jundiaí – SP – CEP 13207-721 – (11) 4521.3899 CNPJ 06.026.815/0001-26 - IE 407.415.469.113</p> <p>Site: <a href="http://www.sapiensvita.com.br">http://www.sapiensvita.com.br</a> E-mail: <a href="mailto:sapiens@sapiensvita.com.br">sapiens@sapiensvita.com.br</a></p>
---	--

*O grande capital de uma organização é o ser humano saudável, apto e motivado.*

## *Testes com amostras de urina, cabelo e ar*



Os Testes detectam as seguintes drogas:

- Álcool (ETIL)
- Anfetamina/Rebite/Bolinha (AMP)
- Antidepressivo Tricíclico (TCA)
- Barbitúrico/Sedativo/Anestésico (BAR)
- Benzodiazepina/Tranquilizante (BZO)
- Cocaína/Crack/Merla (COC)
- Ecstasy/Bala (MDMA)
- Feniclidina/Pó de Anjo (PCP)
- Maconha/Haxixe (THC)
- Metadona/Analgésico (MTD)
- Metanfetamina/Criystal (MET)
- Morfina/Opióides- Ópio/Heroína (MOP)
- Opiáceos (OPI)

### **Testes Individuais (Cassete/Tira)**

COC – THC – AMP

### **Testes Mult 02 ABON (Cassete)**

COC + THC

### **Testes Mult 05 ABON (Cassete)**

COC + THC + AMP + BZO + MOP

### **Testes Mult 06 (Card)**

COC + THC + AMP + MET + (BZO ou MDMA) + MOR (OPI)

### **Testes Mult 10 (Card)**

COC + THC + AMP + MET + BZO + MOR (OPI) + MDMA + BAR + TCA + MTD

### **Testes Mult 12 ABON (Cassete)**

COC + THC + AMP + MET + OPI + PCP + BZO + TCA + BAR + MDMA + MTD + MOP

### **Testes com amostras de cabelo (12 drogas)**

## Como aplicar nossos testes (urina) - PASSO A PASSO -


**TESTE MULT PARA 06 OU 10 DROGAS (CARD)** - Contém: 1 coletor com fita temperatura 1 teste 1 sachê anti-umidade.

**Primeiro passo:** Coletar a urina (qualquer do dia/noite) - coletor de urina - tomando os cuidados para que não tenha nenhuma mistura e que a urina seja da pessoa testada (coleta assistida);


**Segundo passo:** Abrir o envelope, retirar a proteção, mergulhar o teste no recipiente com a urina até o nível indicado por cinco (5) a dez (10) segundos, colocar a proteção e em seguida deixar em superfície plana;

**Terceiro passo:** Aguardar cinco (5) minutos para a leitura do resultado, conforme figura abaixo.

Obs. C = Controle de Qualidade - T = Teste (área do resultado)

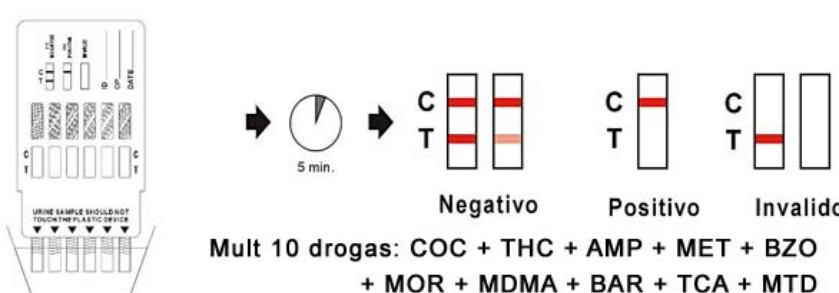


Mult 10 drogas: COC + THC + AMP + MET + BZO + MOR + MDMA + BAR + TCA + MTD




**Teste para 10 drogas**

- Cocaína/Crack
- Maconha/Haxixe
- Anfetamina/Rebite
- Benzodiazepina
- Metanfet/Ecstasy
- Morfina/Heroína
- Metadona
- Ecstasy
- Antidepressivo
- Barbitúrico

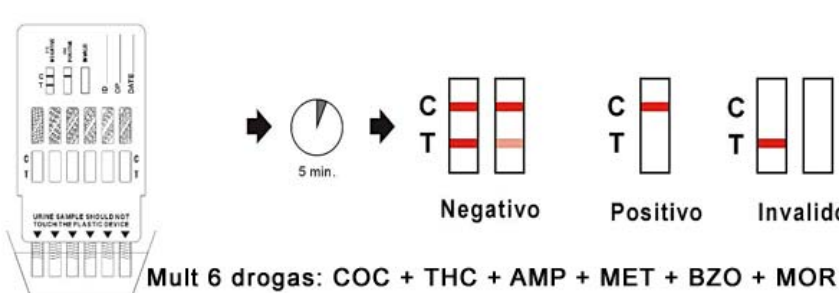

Mult 6 drogas: COC + THC + AMP + MET + BZO + MOR



**Teste para 6 drogas**

- Cocaína/Crack
- Maconha/Haxixe
- Anfetamina/Rebite
- Benzodiazepina
- Metanfet/Ecstasy
- Morfina/Heroína

**TESTE PARA 1 DROGA - CASSETE** - Contém: 1 teste, 1 conta-gotas e 1 sachê anti-umidade

Obs. ver quais drogas disponíveis no site ou consultar para encomenda.

**Primeiro passo:** Coletar a urina (qualquer do dia/noite) em recipiente limpo - coletor de urina ou copo descartável sem uso - tomando os cuidados para que não tenha nenhuma mistura e que a urina seja da pessoa testada (coleta assistida);

**Segundo passo:** Abrir o envelope, colocar o kit em uma superfície plana, com o conta-gotas pingar 3 gotas de urina no orifício indicado;

**Terceiro passo:** Aguardar cinco (5) minutos para a leitura do resultado, conforme figura abaixo.

Obs. C = Controle de Qualidade - T = Teste (área do resultado)



### Tempo para detecção - Janela

DROGA	CONCENTRAÇÃO (Quantidade de droga detectável)	MÍNIMO (Tempo até a droga aparecer na urina)	MÁXIMO (Tempo até a droga ser eliminada da urina)
Anfetamina	1000 ng/mL	2 À 7 HORAS	1 A 3 DIAS
Antidepressivo Tricíclico	1000 ng/nL	3 À 7 HORAS	1 A 3 DIAS
Barbitúrico	300 ng/nL	3 À 7 HORAS	1 A 3 DIAS
Benzodiazepina	300 ng/nL	2 À 7 HORAS	1 A 3 DIAS
Cocaína	300 ng/mL	1,25 À 4 HORAS	1 À 4 DIAS
Ecstasy	500 ng/nL	2 À 7 HORAS	1 A 3 DIAS
Maconha	50 ng/mL	6 À 18 HORAS	ATÉ 10 DIAS
Metadona	300 ng/nL	3 À 7 HORAS	1 A 4 DIAS
Metanfetamina	1000 ng/nL	3 À 7 HORAS	1 A 3 DIAS
Opiáceos	2000 ng/nL	2 À 7 HORAS	1 A 4 DIAS
Fenciclidina	25 ng/nL	2 À 7 HORAS	1 A 4 DIAS
Morfina	300 ng/nL	3 À 7 HORAS	1 A 4 DIAS



Responsável Técnico da Sapiens Vita: Vinicius Bogнар Mistro - CRBM:16604



Teste com amostra de cabelos ou pêlos - Rastreamento com precisão da quantidade de droga utilizada nos últimos 90/180 dias.

#### Teste para detecção das drogas:

- Anfetaminas / Rebite / Bolinha
- Cocaína/Crack / Benzoylcononine / Norcocaine / Cocaethylene
- Ecstasy (MDMA)
- Maconha / Marijuana (Carboxy THC)
- Metanfetamina
- Opiáceos / Opiates / Hidromorfone
- Codeína
- Heroína (6MAM)
- Hidrocodone
- Oxycodine
- Morfina
- PCP - Phenciclidina

Serviço de Orientação ao Cliente: (11) 4522-0118 / 4521-3899 (9604-4959 / 55\*14\*581904 Plantão)

*Unindo esforços pela valorização da VIDA !*